

PU Weichschaum Anwendungshinweis

Lagerung:

- Temperatur min. +18°.
- Dunkel und trocken lagern.
- Ungeöffnete Gebinde sind ca. 1 Jahr haltbar
- Angebrochene Gebinde umgehend verarbeiten
- A- und B-Komponenten sind hygroskopisch.
Sie sind daher stets in dicht verschlossenen Behältern aufzubewahren.



Sicherheit:

- Schutzanzug und Handschuhe sollen getragen werden.
- Brille aufsetzen.
- Nur in großräumigen, gut durchlüfteten, möglichst mit Absauganlage ausgestatteten Räumen anwenden.

Anwendung:

(Arbeitstemperatur mindestens 20°C)

- Gebinde A vor Gebrauch schütteln.
- Einzelkomponenten abmessen
- Komponente A mit Quirl bei hoher Drehzahl aufrühren
ca. 30 Sekunden lang
- Komponente B hinzufügen
- A + B mit Quirl vermischen ca. 10 Sek.
- eingießen und aufschäumen lassen
- Kleine Formen können nach mindestens 2 Stunden Ruhezeit entformt werden.
- Bei größeren Formen muss die Wartezeit entsprechend länger sein.

Bearbeitung:

- Größere Flächen mit geradem (D 7 1 300), bzw. gebogenem Schaummesser (D 7 1 500) schneiden.
- Kleinere Flächen können mit Schleifkegel D 7 1 020 oder Schleifkegel D 7 1 030 bearbeitet werden.

Achtung:

- **Nie** unter + 7 C° lagern oder verwenden.
- **Bitte beachten Sie, dass der Schaum während der Reaktion (Schäumung) eine Temperatur von ca. 45°C erreicht! Stauwärme kann deutlich höher sein!**